

## Istruzioni per il prelievo del campione

**Analisi:** screening molecolare respiratorio (tampone nasale, tampone nasofaringeo, aspirato nasofaringeo)

### Ricerche (codice mnemonico d'accettazione)

**Virus:** Influenza A virus, Influenza B virus, Virus respiratorio sinciziale A/B (1PRESPI); Adenovirus, Enterovirus, Parainfluenza 1-4, Metapneumovirus (1PRESPI); Rhinovirus, Coronavirus NL63-229E-OC43, Bocavirus (1PRESPI);

**1PRESPI + 1PRESPI + 1PRESPI = 1PRESPI**

**Batteri:** Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis (1PRESPI)

**1PRESPI + 1PRESPI + 1PRESPI + 1PRESPI = 1PRESPI**

**In assenza di sospetto specifico si consiglia di richiedere tutti i pannelli**

### Sistema di raccolta/contenitore

**Tampone eNAT tappo azzurro chiaro (tampone Regular)**

**Tampone TranSwab tappo viola**



### Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore

- **Pazienti esterni:** Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
- **Per reparti e ambulatori ospedalieri:** richiedere telefonicamente/e-mail al Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia

**Dove consegnare dopo la raccolta:** in qualsiasi Centro prelievo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Per gli orari d'apertura si veda sito <https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp>.

**Quando:** il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione può essere conservato in frigorifero per non più di 48 ore (non congelare!).

- Aprire la busta contenente il sistema **eNAT** o **TranSwab** (tampone e provetta).
- Eseguire il tampone
- Svitare il tappo del contenitore **eNAT** o **TranSwab** e inserire il tampone.
- Spezzare l'applicatore nel punto indicato dall'apposita costrizione, facendo leva sull'orlo della provetta.
- Riavvitare bene fino in fondo il tappo sulla provetta.
- Scrivere sull'etichetta della provetta il nome del paziente
- Consegnare la provetta con il tampone al più presto in qualsiasi Centro prelievo.

**Nota:** nel sospetto di infezione da **Bordetella pertussis**, è necessario inviare un tampone nasofaringeo o un lavaggio nasofaringeo (no tampone nasale) e indicare il sospetto clinico sulla richiesta.

**IMPORTANTE:** per l'esecuzione di tamponi respiratori per analisi diverse da quelle qui indicate (p.e. esami colturali) utilizzare i sistemi di raccolta specifici.



