

Abstrichtupfer und Parasitenbehälter/Tamponi e contenitori per feci

**Abstriche von Haut, Schleimhäuten, Wunden etc.
Tampone cute, mucose, ferite ecc.**

**Behälter für Stuhl
Contentori per feci**

rosa/rosa

Tupfer /tampone:
Normalgröße/
standard



Material:

- Nase, Rachen, Haut, Wunde, Ulcus, Konjunktiva, intraoperativ, Vagina, Zervix, vagino-rektal,
- Stuhl auf Candida
- Screening für MRSA, VRE, ESBL

Campione:

- naso, gola, pelle, ferita, ulcera, congiuntiva, intraoperatorio, vagina, cervice, vagino-rettale
- feci per candida
- Screening per MRSA, VRE, ESBL

orange/arancione

Tupfer/tampone:
MINI



Material:

- Urethra, Gehörgang, Kornea
- Kinder

Campione:

- uretra, condotto uditivo, cornea
- pazienti pediatrici

hellblau/azzurro

Tupfer /tampone:
Normalgröße/
Standard oder/o
MINI



Material:

- Standard: Nase, Rachen, Konjunktiva, Zervix
- Mini: Urethra, Kornea

Campione:

- Standard: naso, congiuntiva, cervice
- MINI: uretra, cornea

Untersuchung:

PCR auf *Chlamydien*, *Mycoplasmen*/*Ureaplasmen*, Viren

Esame:

PCR per *clamidia*, *micoplasma/ureaplasma*, virus

**Lagerung/
conservazione:**

bei 2-8°C max. 72 h
a 2-8°C mass. 72 ore

rot/rosso

Tupfer/tampone:



Material:

- Nasen – Rachen - Abstrich

Campione:

- tampone nasofaringeo

Untersuchung:

PCR auf SARS-CoV-2

Esame:

PCR per SARS-CoV-2

**Lagerung/
conservazione:**

bei 2-8°C max. 72 h
a 2-8°C mass. 72 ore

grün/verde

**NUR für enteropathogene Keime (Stuhlkultur)/
SOLO per germi enteropatogeni (coprocultura)**

Salmonella, Shigella, Campylobacter
Yersinia

Lagerung/conservazione:

bei Raumtemperatur max. 48 h
oder bei 2-8 °C max. 72
Stunden
temperatura ambientale mass.
48 ore **o** a 2-8 °C mass. 72 ore



braun/marrone

oder dafür vorgesehene Stuhlbehälter
o contenitore idoneo per coprocultura

**Für Enteropathogene Keime/
per enteropatogeni:**

- Salmonella, Shigella, Campylobacter
- Yersinia
- Clostridium sp., Rotavirus, Adenovirus
- Helicobacter pylori
- Stuhl für Hefepilze/feci per lieviti
- **PCR BZ:** EHEC, Norovirus, Protozoen/protozoi



**Für enteropathogene Keime
ODER Parasiten/ per germi
enteropatogeni O parassiti**

Für Parasiten/per parassiti:

3 Proben von 3 Toilettengängen
an **verschiedenen Tagen**
3 prove provenienti da 3 diverse
evacuazioni di **giorni diversi**

Lagerung/conservazione:

Sofort ins Labor bringen o. bei
2-8 °C max. 24 h.
Portare **subito** in laboratorio o a
2-8 °C per mass. 24 ore

Bei Verdacht auf/ Sospetto di:

Giardia lamblia, Dientamoeba fragilis,
Entamoeba histolytica,
Cryptosporidium (-> PCR BZ)
Strongyloides stercoralis

**Umgehend und körperwarm ins
Labor bringen**

**Portare immediatamente in
laboratorio il campione fresco**

Untersuchung/esame:

Kultur Bakterien und Hefen/coltura per batteri e lieviti

Lagerung/conservazione:

bei 2-8 °C max. 48 h/a 2-8 °C mass. 48 ore

Ausnahme/Eccezione! Gonokokken/gonococchi

bei Raumtemperatur lagern und **sofort** ins Labor
bringen

conservare a temperatura ambiente e portare **subito**
in laboratorio

CAVE!

Halbvoll / riempito a metà

ggf. werden 2 Röhrchen benötigt / in caso contrario servono 2 contenitori